

Act + Fast™

Anti Choking Trainer

Тренажор за помощ при задавяне



Комплектът включва:

Неопренова жилетка; Балон и тръба от PVC; 30 тапи от пяна
Ръководство за употреба; Чанта за съхранение
Допълнителна подложка за гръб.

Никой от елементите не съдържа олово и латекс

1 година гаранция

ct Fast LLC

За допълнителни указания пишете на:
info@actfastmed.com

Изработено от
устойчив неопрен

Adjustable shoulder
straps for easy fit.

Vest front side

Регулируеми
презрамки

Тръба от прозрачен PVC
материал, за да се
наблюдава освобождаването
на трахеята

Подложка на гръба за
упражняване на удари
между плешките (вж.
предупреждението).

Поставете ръцете
върху балона

Пъпът помага за
правилното
поставяне на
ръцете

Vest back side


Optional Back Slap Pad included.

Указания за употреба


Наблюдавайте внимателно децата по време на обучение. За повече подробности вижте Ръководството за употреба Act+Fast.

Всеки комплект съдържа 10 зелени тапи за начинаещи и 20 жълти за напреднали. Тапите са изработени от пяна и ако е необходимо, можете да ги потъркаляте между пръстите си, за да омекнат и да излизат по-лесно през тръбата..

Foam plugs can be softened by rolling with fingers. Allowing them to be expelled more easily from the trainer, if needed.

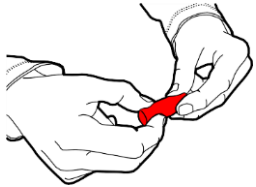


Нахлузете жилетката през глава и затегнете лентите на рамената и кръста. Пуснете една тапа в „трахеята“.

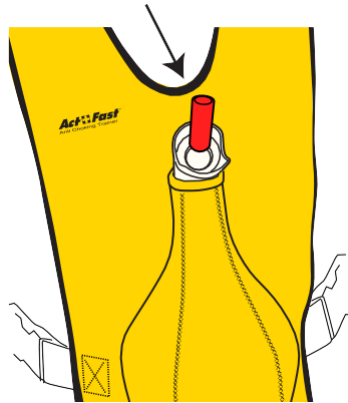

Размерът на тапите е типичен за предмети, представляващи риск от задавяне. Пазете ги на недостъпно място за деца под 4-годишна възраст.

Предупреждение: пазете очите от тапите.


Поставете ръце, както е показано, между пъпа и долната част на гърдния кош.

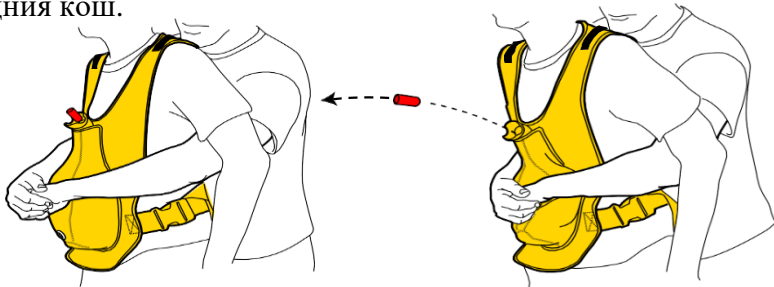

Притиснете рязко навътре и нагоре, за да изхвърлите тапата от „трахеята“. Прилагането на излишна сила може да причини травма. При правилно изпълнение тапата се изстрелва във въздуха, с което дава незабавна обратна връзка за ефективността на манипулацията и ясно илюстрира идеята на техниката.

Упражнявайте удари между плешките върху подложката на гърба.

Предупреждение: симулирайте ударите, без да прилагате сила.

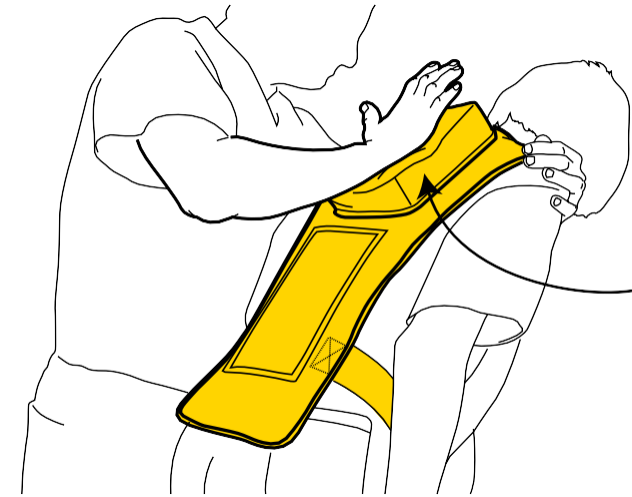

Жилетката може да се използва в различни позиции, пресъздаващи реалистични сценарии, в т.ч. в изправено, седнало и легнало положение на тялото.

С нея може да се упражнява и техника за самоспасяване с помощта на ръба на плот или облегалка на стол

ПОЧИСТВАНЕ

Отлепете лентите с велкро от долната страна на жилетката и отделете въздушния балон и тръбата от неопрена.

