

Изработено от устойчив неопрен.

L

Регулируеми презрамки.

Vest front side

Тръба от прозрачен PVC материал, за да се наблюдава освобождаването на трахеята.

Големи катарамии с регулируеми ленти за лесна употреба!

Подложка на гърба за упражняване на удари между плешките (вж. предупреждението)

Поставете ръцете върху балона

Пъпът помага за правилното поставяне на ръцете

Изглед на жилетката отзад

Act+Fast™

Тренажор за помощ при задавяне Ръководство за употреба



Комплектът включва:

Неопренова жилетка; Балон и тръба от PVC; 30 тапи от пяна
Ръководство за употреба; Чанта за съхранение
Никой от елементите не съдържа олово и латекс


1 година гаранция

За допълнителни указания пишете на: info@actfastmed.com
Act Fast LLC www.actfastmed.com

Указания за употреба

Да се използва под наблюдение от инструктор


Всеки комплект съдържа 10 зелени тапи за начинаещи и 20 жълти за напреднали. Тапите са изработени от пяна и ако е необходимо, можете да ги потъркаляте между пръстите си, за да омекнат и да излизат по-лесно през тръбата.

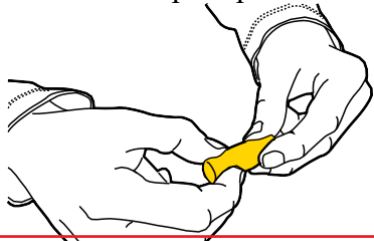


Размерът на тапите е типичен за предмети, представляващи риск от задавяне. Пазете ги на недостъпно място за деца под 4-годишна възраст.

Нахлузете жилетката през глава и затегнете лентите на рамената и кръста.

Пуснете една тапа „трахеята“.

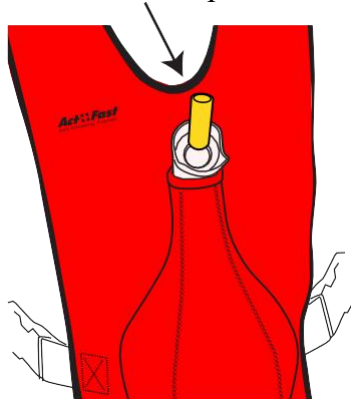


Поставете ръце, както е показано, между пъпа и долната част на гръдния кош. Притиснете рязко навътре и нагоре, за да изхвърлите тапата от „трахеята“.

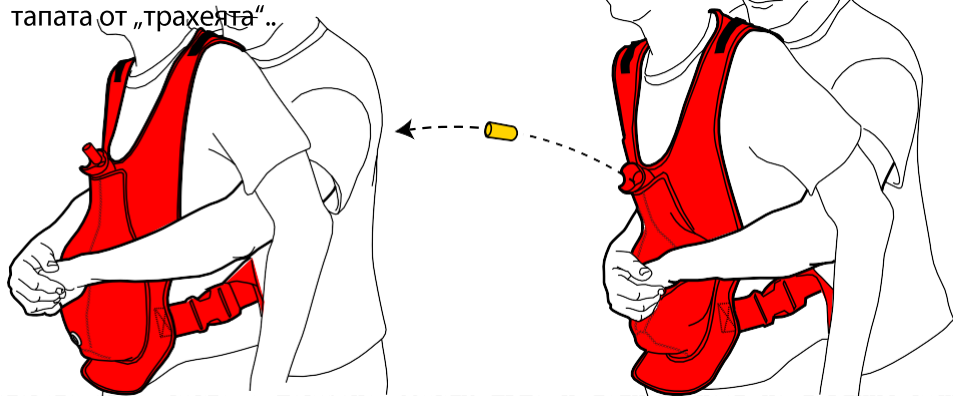

Поставете ръце, както е показано, между пъпа и долната част на гръдния кош. Притиснете рязко навътре и нагоре, за да изхвърлите тапата от „трахеята“. Прилагането на излишна сила може да причини травма. При правилно изпълнение тапата се изстрелва във въздуха, с което дава незабавна обратна връзка за ефективността на манипулацията и ясно илюстрира идеята на техниката. Предупреждение: пазете очите от тапите.

Упражнявайте удари между плешките върху подложката на гърба.


Предупреждение: симулирайте ударите, без да прилагате сила.

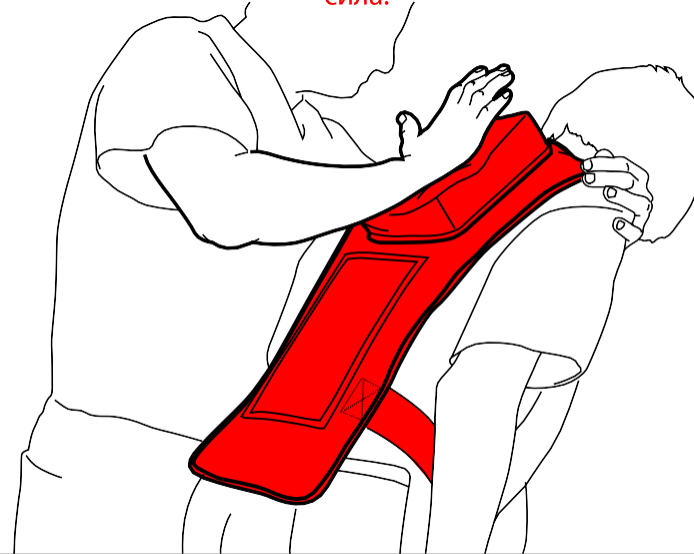

Жилетката може да се използва в различни позиции, пресъздаващи реалистични сценарии, в т.ч. в изправено, седнало и легнало положение на тялото. С нея може да се упражнява и техника за самоспасяване с помощта на облегалка на стол.

Почистване

Отлепете лентите с велкро от долната страна на жилетката и отделете въздушния балон и тръбата от неопрена.

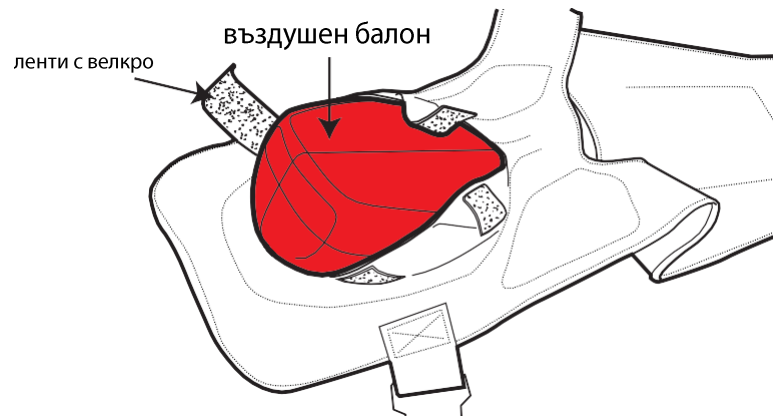

При нужда изперете жилетката на ръка с мек препарат и окачете, за да изсъхне на въздух